



ご存知ですか？ “自宅”でできる がんリスク検査

今、できる事からはじめよう！
おうちでできるセルフ・ヘルスケア

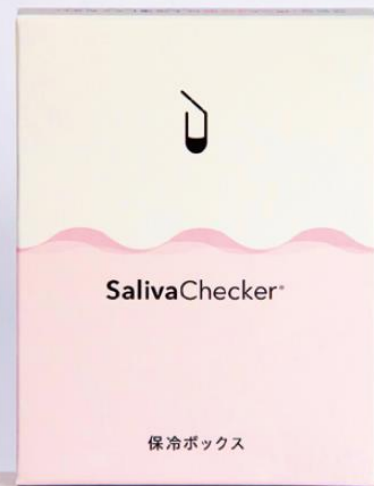

がんの部位別・臨床病期別の5年ネット・サバイバル※1

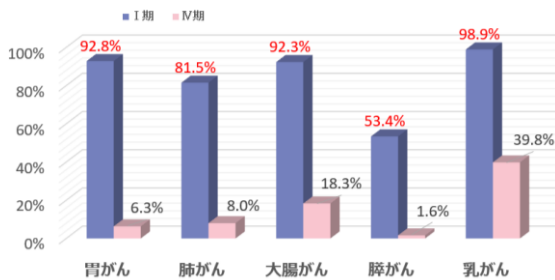

※1 出典：国立がん研究センターがん情報サービス「院内がん登録生存率集計」5年ネット・サバイバル（純生存率）2014年～2015年診断症例
※2 出典：国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」

男女別 がん検診受診率（2022年）※2

欧米の検診受診率が80%以上であるのに対し、
日本は35%～50%程度と受診率が低いのが現状です。

	胃 (過去1年間)	肺 (過去1年間)	大腸 (過去1年間)	乳房 (過去1年間)
男性	47.5%	53.2%	49.1%	—
女性	36.5%	46.4%	42.8%	47.4%

早期発見できればがんの治療効果が高くなります

がんの**早期発見・早期治療**に向けた健診が重要です

MY ひまわりにご登録で使えるサービス

だ液によるがんリスク検査

SalivaChecker® サリバチェッカー®

サリバテック社web直販価格
通常26,400円(税込)のところ

特別価格：**12,100円(税込)**

サリバチェッカーおすすめの理由 //

一度に複数のがんリスクが分かる！



自分も家族も安心

早期発見ができれば治療の負担も少なく、家族も安心です。



痛くない

数滴のだ液を採取するだけなので、体に負担をかけません。



確かな臨床研究


検査技術の基礎となった研究は、多くの論文が国際的な学術誌に掲載されています。



どうしてだ液でがんのリスクが分かるの？

がん細胞からしみ出す代謝物がだ液に表れるからです。

だ液は「身体の鏡」といわれ、血液や尿と同じように健康状態の指標となる多くの情報を含みます。だ液中の成分の大部分は血液由来のため、がん細胞からしみ出す代謝物は血管を通り、だ液中にしみ出します。サリバチェッカーは、最新の装置を用いてこれらの物質を測定・解析します。

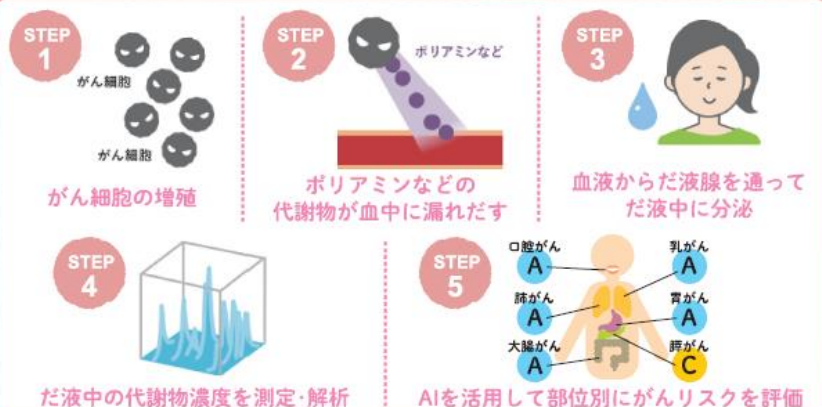

検査の流れ

だ液の採取手順は
動画でも確認できます！



01 検査キットが自宅に届く



お申し込み後キットが届きます。キットを冷凍庫で3時間以上冷凍させます。
※内包の保冷剤は固まらないタイプです。

02 だ液を少量とって送る



だ液を採取します。採取時間は2～5分程度です。採取後、冷凍庫で凍らせた上で、箱に入れ、冷凍便で返送します。

03 測定・解析

だ液中の代謝物を測定し、結果をAIで解析することで、がんのリスクを評価します。



04 検査結果

だ液が検査所に到着してから約1ヶ月以内に検査結果を郵送します。



05 検査を受けた後は

がんのリスク値が高い場合は、かかりつけ医またはサリバテック社提携の医療機関に相談されることをお勧めします。



採取キット提出期限：キット到着から6ヶ月

※期限内にご提出いただけない場合は、検査結果をお返しすることができません。

サービスご利用の流れ ～ 保険契約のないお客さまもご利用可能です ～

サービスのお申し込みには、MYひまわりのご登録が必要です。「新規登録はこちら！」に表示している二次元コードからMYひまわりのアカウントを登録してください。



- アカウントを登録すると各種サービスや当社アプリをご利用いただけます。
- ご契約情報(証券番号等)を登録するとご契約内容の照会・各種手続きが可能です。

注意事項

- 本検査は遺伝子検査のように将来的な罹患リスクを調べるものではなく、今現在、がん罹患している可能性を調べる検査です。
また、本検査により得られる情報は医師の診断に代わるものではありません。本検査結果のリスク評価結果にかかわらず身体に何等かの自覚症状がある場合は速やかに医療機関を受診ください。
- 本検査は、次に当てはまる方はリスク評価結果に影響を受ける可能性があります。
○ 妊娠中・授乳中の方 ○ 発熱など炎症に伴う症状がある方 ○ 自己免疫性疾患(潰瘍性大腸炎・リウマチ等)を有する方 ○ ドライマウス・シェーグレン症候群の方
○ 検査前の注意事項を守っていない方 ○ がん治療中(手術・抗がん剤治療・放射線治療)の方、その他疾患による手術を受けた方
- だ液採取前日から食事等の制限があります。本検査は採取しただ液を凍結させ、冷凍便で返送いただきます。(着払い伝票を同梱しています。)
- サリバテックは、当社が提携する(株)サリバテックのサービスを提供するものであり、サリバテックについて当社は責任を負いかねます。
- 年末年始など一部受付を行わない日がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本チラシに記載のサービスは、2025年5月現在のものであり、本サービスは予告なく変更・終了する場合があります。
- サリバテックの内容に関するお問合せは、(株)サリバテックHPからお問合せ下さい。



「二次元コードが読みとれない場合」

SOMPOひまわり生命のオフィシャルホームページにある「MYひまわり」登録お手続きページからご登録をお願いします。
会員基本情報入力画面にある「代理店担当者から紹介された方」「企業担当者から紹介された方」欄には、二次元コード右隣に記載の各種コードを入力の上ご登録ください。

サービス紹介動画

サービス概要や特徴、精度についてご説明しております。



新規登録は
こちらから！



代理店コード：008P4
募集人コード：0127

＜検査キット開発元／検査・測定機関＞



株式会社サリバテック

＜公式ウェブサイト＞ <https://salivatech.co.jp/>

＜お問い合わせ先／MYひまわり運営元＞

SOMPOひまわり生命保険株式会社
横浜開発支社 (担当：田中、清水)

〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル3階
TEL：050-2026-8523
＜公式ウェブサイト＞ <https://www.himawari-life.co.jp/>